

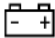


عملکرد کلید ها:

کلید  : جهت خاموش و روشن کردن دستگاه از این کلید استفاده نمایید.

 LED : در صورت وصل بودن دستگاه به برق شهر، به رنگ سبز روشن می شود.

 LED : در صورت وجود باطری در دستگاه و قطع برق شهر، به رنگ سبز روشن می شود.

ECG LEAD : جهت تغییر Lead در نمایش سیگنال ECG استفاده می گردد.

NIBP : جهت انجام عمل اندازه گیری فشار خون بیمار آن را فشار دهید.

IBP ZERO ALL : برای دسترسی سریع جهت صفر نمودن IBP2, IBP1 استفاده می شود.

Silence : جهت غیر فعال کردن آلام های صوتی به مدت 2 دقیقه می باشد.

Freeze : با فشردن این کلید، حرکت سیگنال ها بر روی صفحه نمایش جهت مشاهده دقیق متوقف شده و با فشردن مجدد، روند نمایش تکرار می گردد.


Menu : با فشردن این کلید منوی اصلی تنظیمات دستگاه فعال می شود.

Rotary Knob : با چرخاندن آن به چپ و راست میتوان در یک منو خاص حرکت کرد. برای انتخاب یک پارامتر، کافی است آن را فشار دهید.


Led Light : نمایشگر نورانی در بالای دستگاه که در صورت بروز هشدار سطح بالا (High) قرمز چشمک زن و هشدار سطح پایین (Low, Medium) زرد چشمک زن می گردد.

Factory Setup : تنظیمات دستگاه را به حالت پیش فرض کارخانه تغییر میدهد.


هشدار ها:

جهت استفاده بهتر از مانیتور در بخش های مختلف مراکز درمانی Default, Full ECG, CCU, 

OR1, OR2 طراحی شده که از مسیر Menu->Setup->Display Mode می توان صفحه مورد نظر را انتخاب نمود.

تنظیم چیدمان نمایش سیگنال ها فقط در صفحه Default از مسیر Menu->Setup-> 


Signal Line امکان پذیر می باشد و در بقیه صفحات نحوه نمایش سیگنال ها ثابت می باشد.

در صورت اتصال مداوم دستگاه به برق شهر، هر هفته یک بار کابل برق شهر را از دستگاه قطع 


نمایید تا دستگاه با باتری شارژ شده کار کند و هنگام مشاهده آلام Low Battery، آداپتور مجدداً به دستگاه متصل نمایید تا طول عمر مفید باتری داخلی دستگاه بیشتر گردد.

هنگام جدا نمودن لوازم جانبی از دستگاه، مخصوصاً سنسور SPO2 کابل مربوطه را نکشید و 


با احتیاط به کمک کانکتور های مربوطه، لوازم را از دستگاه جدا نمایید.

فقط از لوازم جانبی مخصوص دستگاه که توسط شرکت صایران مشخص شده اند جهت اتصال 

به دستگاه استفاده نمایید تا منجر به خرابی دستگاه نگردد.

قابلیت تنظیم تاریخ دستگاه به صورت شمسی و میلادی را از مسیر ذیل امکان پذیر می باشد: 

.Menu->Setup->calendar

در صورت بروز اشکال و یا درخواست لوازم جانبی با مرکز خدمات پس از فروش 

شرکت الکترو اپتیک صا ایران، با تلفن های 0311) 4520330-1 تماس حاصل فرمایید.